



Split Cast

by

- Mode d'emploi
- User Manual
- Modo de empleo
- Bedienungsanleitung



 **fag**
dentaire





647 Chemin de l'Épinette – 74300 CLUSES
Tél. : +33 (4) 50 98 04 91

Contact : admin@fag.fr
Site commercial : fag-dentaire.com
Site entreprise : holding-fag.com

Split Cast Ref. : QM-2000



2 Vis
2 screws – 2 tornillos – 2 schrauben

2 aimants
2 magnets – 2 imanes – 2 magnete

2 plaques Split cast
2 Split Cast plates - 2 placas Split Cast – 2 Split Cast

2 disques de rétention
2 retention disks - 2 discos de retención - 2 retentionsscheiben


1

Retirer l'écrou de la vis
Remove the nut of the screw
Retire la tuerca del tornillo
Die mutter der schraube entfernen






2

Fixer les vis sur l'articulateur
Fixe the screws on articulator
Apriete los tornillos para el articulador
Die schrauben in den artikulator fixieren

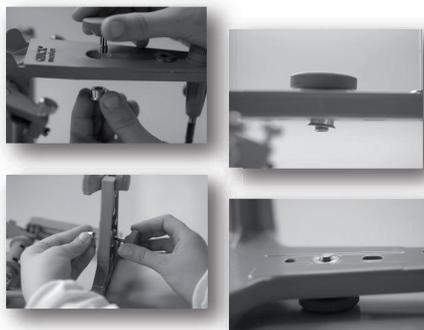

3

Fixer les aimants sur l'articulateur
Fixe the magnets on articulator
Fijar los imanes al articulador
Die magnete in den artikulator fixieren

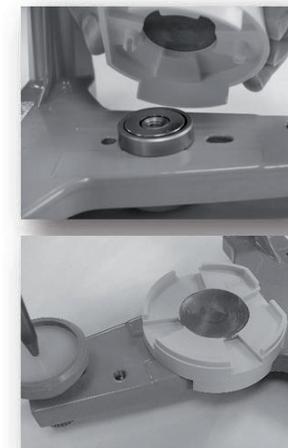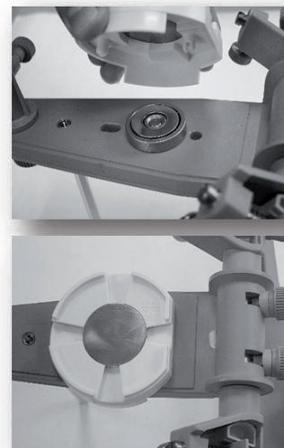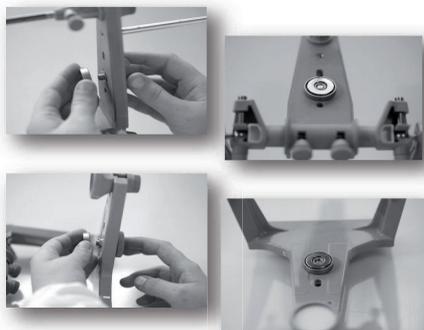

Lors du nettoyage de l'articulateur, retirer les supports aimantés pour éviter la corrosion.
When cleaning the articulator remove magnetic brackets to prevent corrosion.

Cuando limpie el articulador retire los soportes magnéticos para evitar la corrosión.
Während des Artikulatorsreinigung, entfernen die magnetischen Klammern um die Korrosion zu verhindern.



Plaques avec disques de rétention
Split Cast plates with retention disks
Placas Split Cast con discos de retención
Split cast platen und retentionsscheiben



Disques de rétention
Retention disks
Discos de retención
Retentionsscheiben

Réf. : QM-2010 X 24

Réf. : QM-2020

Réf. : QM-2050 X 100

X 50